

## Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

### Guia de Colocação e Ajuste



1

- Segure as almofadas sobre o nariz e puxe o arnês sobre a cabeça.
- O arnês deve ser posicionado a meio caminho entre as orelhas e os olhos.




2

- Ajuste primeiro a correia superior.
- Puxe a correia através da fivela, um furo de cada vez.
- Não aperte excessivamente.



3

- Ajuste a correia traseira para fazer um ajuste fino, se necessário.
- Não aperte excessivamente.
- A correia traseira pode ser posicionada sobre ou sob o cabelo.

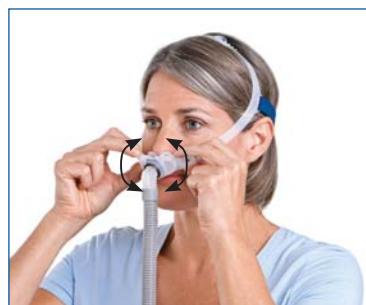


4

- As almofadas Swift FX são projetadas para oferecer um ajuste natural.
- Pequenos ajustes podem ajudar a posicionar as almofadas no ângulo mais confortável no nariz.



5

- Conecte o tubo curto da Swift FX ao tubo de ar do dispositivo.
- A Swift FX já está ajustada e pronta para uso.

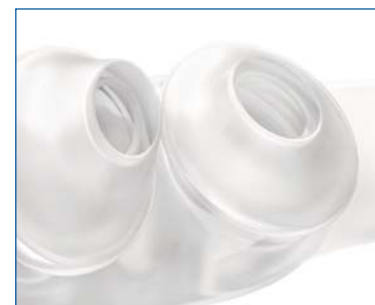

DICA

- Com o dispositivo ligado, verifique se as almofadas nasais estão devidamente infladas. Para isso, afaste as almofadas nasais do rosto e certifique-se de que estão infladas. Em seguida, reposicione-as no nariz.

#### ENVOLTÓRIOS MACIOS OPCIONAIS

- Prenda cada envoltório macio em torno de cada lado do arnês, dobrando o fecho superior sobre o inferior.
- Os envoltórios macios devem ser posicionados sobre as bochechas, com os fechos voltados para fora.



Nota: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Sistema de Almofadas Nasais Swift FX.

ResMed Corp San Diego, CA, EUA +1 858 836 5000 ou 1 800 424 0737 (ligação gratuita). ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Austrália +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (ligação gratuita). Consulte [www.resmed.com](http://www.resmed.com) para obter outras localizações da ResMed em todo o mundo. Swift é uma marca comercial da ResMed Ltd e encontra-se registrada no Registro Norte-americano de Marcas e Patentes. ©2009 ResMed. As especificações podem mudar sem aviso prévio. 1013574/1 09 09

## Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

#### Tudo nela é macio e simples

- Maciez, simplicidade e estabilidade sem precedentes
- Formato flexível e fluido acompanha os contornos faciais e os movimentos do usuário
- Promove aceitação rápida do tratamento
- Ajuste intuitivo, praticamente instantâneo
- Desempenho estável, mesmo a pressões altas

As almofadas nasais de parede dupla vedam por contato de forma suave e confortável, oferecem uma ampla faixa de ajustes e dispersam o ar suavemente para o nariz

A almofada macia e estreita com câmara flexível integrada torna confortável dormir de lado e ajuda a manter a vedação durante o movimento

O cotovelo ultra-macio com rotação de 360° gira com facilidade e fluidez, permitindo maior flexibilidade de posições do tubo

Respiradouros silenciosos dispersam e direcionam o fluxo de ar silenciosamente para longe do usuário e do parceiro de cama

O tubo leve e ultra-flexível se estende e dobra de forma exclusiva para maior estabilidade sem o uso de um retentor de tubo

Fivela superior simples com furos bem marcados para fácil ajuste

Arnês de silicone macio envolve o rosto delicadamente e precisa de ajustes mínimos – configuração padrão se ajusta à maioria dos usuários

Correia traseira discreta com fechos de Velcro oferece ajustes finos e fáceis

Envoltórios macios aumentam o conforto nas bochechas

Indicadores de tamanho e nome facilitam identificar o tamanho e a correta orientação da máscara

Encaixe preciso para prender e desprender facilmente as correias laterais

Almofadas flexíveis com ação elástica acomodam o movimento em várias direções enquanto cuidam da vedação



#### DESTAQUES DA MÁSCARA

##### Conforto todo o tempo

- Com contato facial mínimo e um design discreto, a Swift FX torna o tratamento menos intimidante e mais fácil de ser aceito desde o início.
- Da ponta das almofadas nasais às laterais macias e protegidas, dos envoltórios macios confortáveis à correia traseira discreta... a Swift FX é tão leve e delicada que os pacientes até esquecem que ela existe.
- As correias justas do arnês fazem o trabalho de manter a vedação, de modo que o ajuste parece suave e não há necessidade de apertar em excesso o arnês.

#### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

##### Conforto suave, desempenho estável

- O design maleável de todo o sistema aumenta o conforto.
- As almofadas nasais de parede dupla e a base de amortecimento flexível mantêm a vedação enquanto se adaptam ao movimento.
- O tubo leve e flexível reduz a tensão sobre a máscara e aumenta a estabilidade.

##### Os pacientes até esquecem que ela existe

- O design mínimo reforça o senso de liberdade – isso tem a ver com o contato da máscara sobre o rosto e seu visual.

##### Permite dormir em várias posições

- Os usuários da Swift FX podem dormir de lado ou de costas, posicionando o tubo como desejarem.

##### Funcionamento silencioso para um sono tranquilo

- Design de respiradouro inovador permite um funcionamento super-silencioso – e dispersa suavemente o ar para longe do paciente e de seu parceiro de cama.

#### VANTAGENS PROFISSIONAIS

##### Ajuste intuitivo, praticamente instantâneo

- Poupa um valioso tempo dos médicos e profissionais do sono. Depois de selecionado o tamanho de almofada certo, o ajuste é mínimo.

##### Vedação estável a pressões altas

- Dotado de um projeto exclusivo, o sistema permanece no lugar e mantém a vedação com eficácia, mesmo a pressões de tratamento altas.\*

##### Fácil aceitação da terapia por parte dos pacientes

- Projetada para ser atraente, a Swift FX é uma máscara que não intimida, facilitando a aceitação da terapia desde o início.

##### Menor estoque, grande faixa de ajuste (>95%)\*\*

- Três tamanhos de almofadas acompanham o produto, para ajuste à maioria dos usuários, reduzindo o estoque.
- Existe ainda um tamanho Extra Pequeno.

##### Fácil manuseio do produto

- Com muito poucas peças, a Swift FX é fácil de limpar e montar.

##### Conveniente para recomendar ou prescrever

- O manual do usuário e o suporte on-line facilitam o treinamento para usuários e profissionais.



#### CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Sistema de Almofadas Nasais Swift FX  
Américas **61500**

## Swift™ FX

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

### Cartão de componentes

#### Sistema completo

61500 (inclui almofadas nasais Pequenas (P), Médias (M) e Grandes (G)\*)

#### Sistema de armação

(sem arnês)  
EP\* **61510**  
P **61511**  
M **61512**  
G **61513**

Montagem do arnês  
(arnês, correia traseira)  
**61529**

Conjunto de tubo curto  
(tubo curto, cotovelo e peça giratória)  
**60123 (1)**  
**60124 (10)**

Almofadas  
EP\* **61520**  
P **61521**  
M **61522**  
G **61523**

Envoltórios macios  
**61530 (2)**

\* As almofadas do tipo Extra Pequeno (EP) estão disponíveis separadamente

\* Avaliada até 20 cm H<sub>2</sub>O em testes clínicos

\*\* Com base em pesquisa de mercado da ResMed